



Estimado cliente,

En Tormamed hemos trabajado en conjunto con la fábrica para producir un protocolo de desinfección para Imperium Med 400®:

- a) Ventilar el área de trabajo durante y después del uso de productos desinfectantes.
- b) Use **equipo de protección personal*** mientras lleve a cabo la desinfección.
- c) Usando una **solución a base de lejía o alcohol al 70%***, desinfecte todas las superficies de trabajo (camilla, mobiliario, etc.).
- d) Desenchufe el equipo.
- e) Empape una **toalla seca*** en agua tibia y jabón de glicerina, escúrrala bien y pásela por todas las superficies del equipo, cables y manípulos.
No permita que entre líquido en el equipo o manípulos.
- f) Con otra toalla seca elimine el exceso de agua del paso e).
- g) Una vez realizado la limpieza del equipo, procederemos a su desinfección; usando una **solución alcohólica al 70%** o en su defecto, agua oxigenada al 0,5%.

Aplicar la solución en el equipo, cables y manípulos usando una toalla seca nueva, dejar actuar por un minuto y retirar el exceso en caso de ser necesario con otra toalla.

NOTA: el paso e) tiene como función la limpieza e hidratación de los plásticos, dado que la glicerina es un hidratante de plásticos. Y el uso prolongado de productos como el alcohol, agua oxigenado y/o lejía pueden acelerar el desgaste de los plásticos.

***Productos disponibles en nuestro catálogo.**

Saludos cordiales,

Equipo de Torma Medical Distributions S.L.

622 560 461 – att.cliente@tormamed.com (pedidos y consultas)